


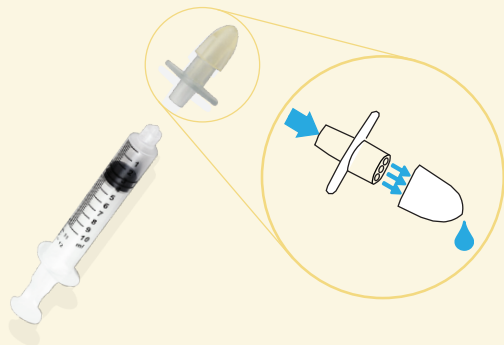

NASIR BABY È CONSIGLIATO
dalle ostetriche dai medici pediatri
e dagli otorinolaringoiatri

ugello morbido
per lavaggio nasale
a bassa pressione
e flusso continuo



MADE IN ITALY

Tutti i prodotti EP Medica sono realizzati
o subiscono l'ultima lavorazione sostanziale in Italia.

Nasir®
BABY

Via dell'artigianato 30
48034 Fusignano (RA)
C.F. e P.I. 02506400395

+39 0545 1893255 | info@epmedica.it
www.epmedica.it

rev. 01/2024 - emissione 06/2024

Nasir®
BABY



Igiene & Benessere
IRRIGAZIONE NASALE
Per la pulizia quotidiana del naso
0-36 MESI

Lavaggio nasale studiato per le esigenze dei neonati, lattanti e bambini fino ai 3 anni d'età.

Favorisce la detersione quotidiana del nasino e il respiro fisiologico, eliminando gli agenti infettivi delle vie respiratorie conseguenti al ristagno del muco.

Può prevenire e curare i sintomi di **raffreddore, sinusite, otite, bronchite, rinite, allergia e respirazione orale**. Sicuro e senza effetti collaterali, permette di ridurre l'uso di antistaminici e cortisone.

QUANDO FARE IL LAVAGGIO?

prima della poppata
prima del sonno
prima dell'utilizzo dello spray nasale
in caso di allergie e/o asma

LE NOSTRE PROPOSTE IN COMMERCIO

BABY confezione da 3 ugelli anatomici brevettati
KIT 1 sacca da 250 ml di soluzione fisiologica
1 siringa da 10 ml
1 ugello anatomico brevettato

ALCUNE REGOLE PER UN LAVAGGIO EFFICACE

TEMPERATURA

Il naso riscalda l'aria che respiriamo. Per mantenere l'efficienza della risposta immunitaria è importante **intiepidire la soluzione tra i 35° e i 38°**.

POSIZIONE

Sdraiare il bambino con la testa voltata lateralmente e introdurre lentamente la soluzione nella narice opposta al fianco su cui è sdraiato. Si raccomanda di tenere la bocca aperta.


PRESSIONE

Dosare il flusso con la giusta pressione del pistone della siringa. Una pressione eccessiva potrebbe provocare uno spostamento del muco nelle tube uditive e provocare otiti.



COME FARE IL LAVAGGIO NASALE

Riempire la siringa con la soluzione sterile.
Mettere il bambino sdraiato sul fianco con la testa di lato.
Inserire l'ugello anatomico sulla siringa e posizionarlo nella narice più in alto e inclinare la siringa in modo che punti verso l'orecchio dello stesso lato, per permettere una migliore fuoriuscita del muco.
Introdurre la soluzione con un movimento continuo, dolce e graduale. La soluzione uscirà dall'altra narice.
Asciugare il naso.
Posizionare il bambino sul fianco opposto e ripetere la procedura con la seconda narice.
Se il muco è abbondante ripetere l'operazione da entrambe le narici.

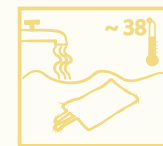

1 INTIEPIDIRE
intiepidire la soluzione
tra i 35° e i 38° C prima dell'utilizzo



2 ASPIRARE
la soluzione con una siringa
alla cui sommità è stato in precedenza
applicato l'ugello anatomico



3 INTRODURRE
la soluzione nella narice più alta
sdraiando il bambino su un fianco
con la testa voltata di lato.
Ripetere con l'altra narice.