



Nasir NEB è un dispositivo indicato per la somministrazione di soluzioni topiche attraverso la nebulizzazione intranasale, quali antinfiammatori, analgesici, anestetici, antistaminici, anticonvulsivi, in ambito ospedaliero o domiciliare.

DESTINAZIONE D'USO

È indicato inoltre per il trattamento delle cavità nasali, dei seni paranasali e delle vie aeree superiori per la somministrazione di lavaggi nasali.

AMBIENTE D'USO

Il dispositivo è destinato ad essere utilizzato in qualsiasi ambiente.

UTILIZZATORI

Indicato per lattanti, bambini e adulti.

CONTROINDICAZIONI

Non usare in caso di gravi infezioni dell'orecchio o delle vie respiratorie superiori, forte congestione nasale, sintomi di raffreddore e timpano perforato.

LIMITI D'USO

Il dispositivo è destinato ad un uso monopaziente.

Al termine dell'utilizzo sciacquare l'ugello con normale acqua potabile dentro e fuori il dispositivo e conservarlo in luogo asciutto e al riparo dalla luce e da fonti di calore. Al successivo riutilizzo, procedere prima alla disinfezione immergendo l'ugello in AMUCHINA® soluzione al 2% (20 ml di prodotto in un litro di acqua). Lasciare agire il disinfettante per 15 minuti e risciacquare abbondantemente dentro e fuori l'ugello con acqua potabile.

Con queste precauzioni, si potrà usare l'ugello per un numero massimo di 100 erogazioni, entro 1 mese dall'apertura della confezione.

Impiegare il prodotto esclusivamente per l'uso a cui è destinato.

Dopo l'uso non disperdere nell'ambiente e smaltirlo come un comune rifiuto urbano.

AVVERTENZE

- Non utilizzare Nasir NEB dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.
- Non utilizzare se la confezione o il dispositivo sono aperti o danneggiati.
- Prima dell'uso consultare un medico qualificato.
- Non utilizzare in caso di epistassi (sangue dal naso) in corso o appena conclusa.
- Non usare in caso di ipersensibilità specifica a qualche componente.
- Per disabili, anziani e bambini è consigliata l'assistenza di una persona adulta in fase di utilizzo.
- Contiene parti di piccole dimensioni e pericolose (ugello e ago): tenere lontano dalla portata dei bambini e di animali.
- Il prodotto è per uso esclusivo esterno.
- Non forzare il dispositivo nella cavità nasale.
- Non sterilizzare in autoclave.
- Dopo l'uso non disperdere nell'ambiente.
- Conservare al riparo di luce solare diretta e fonti di calore.
- Non congelare.

MODALITÀ D'USO

- Collegare l'ago alla siringa e rimuovere il cappuccio di protezione dell'ago
- Inserire la siringa con ago nel flacone o bottiglia della soluzione da nebulizzare e prelevare il liquido tirando indietro lo stantuffo della siringa
- Mantenere il dispositivo in posizione verticale con la siringa rivolta verso l'alto e rimuovere l'ago
- Mantenendo il busto eretto, appoggiare l'ugello nebulizzatore al naso e premere delicatamente sulla narice
- Premere lo stantuffo in modo energico per nebulizzare la soluzione
- Se necessario, ripetere i passaggi nell'altra narice

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 ugello nebulizzatore Nasir NEB

1 siringa Luer Lock da 10 ml

1 ago ipodermico

Istruzioni

Il paziente e/o l'utilizzatore sono tenuti a segnalare qualsiasi incidente grave occorso con l'uso del dispositivo: tale segnalazione deve essere inoltrata al Ministero della Salute secondo le modalità definite all'interno del sito del ministero e per conoscenza a E.P. Medica.

	Numero di lotto
	Codice merceologico di riferimento
	Non utilizzare se la confezione è rotta o danneggiata
	Marcatura CE secondo i requisiti del REG 745-2017
	Pericolo generico
	Leggere le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso
	Fabbricante (produttore)
	Data e paese di fabbricazione
	Dispositivo medico

Prodotto da E.P. Medica Srl
Via dell'artigianato 32
48034 Fusignano (RA)

+39 0545 1893255 | info@epmedica.it

www.epmedica.it