



**Dispositivo per l'irrigazione nasale efficace e rapida, indicato per l'igiene quotidiana tramite la doccia delle mucose nasali.**

Previene ostruzioni dovute a patologie quali: raffreddore, tosse, sinusiti, decorsi post-operatori, otiti, asma, bronchiti, poliposi nasale, allergeni o causate da contaminazioni ambientali quali polveri, fumo o esalazioni ed è un coadiuvante nella terapia dell'ostruzione nasale notturna.

Grazie al suo ugello erogatore a "L" progettato per semplificare l'irrigazione e limitare la pressione della siringa, NASIR RAPID permette un lavaggio nasale in sicurezza con un flusso continuo della soluzione. L'ugello erogatore a "L" può essere collegato a qualunque siringa dotata di connettore tipo Luer Lock.

## **POSOLOGIA**

**Per adulti e bambini sopra i 3 anni si consigliano da 1 a 2 irrigazioni al giorno o secondo diversa specifica indicazione medica.**

In caso di congestioni molto intense è consigliabile rivolgersi al medico curante prima di procedere con il trattamento.

## **ISTRUZIONI D'USO**

Rimuovere con attenzione la busta di protezione della sacca di soluzione.

Intiepidire la sacca con la soluzione a 35°-38° circa immergendola in acqua calda. Togliere, svitandolo, il tappino di protezione.

Avvitare la siringa al tubo della sacca e rompere il cono a frattura (a punta di freccia) all'interno del tubo della sacca.

Aspirare la soluzione della sacca e svitare la siringa.

Avvitare l'ugello erogatore a "L" alla siringa, verificando che arrivi a fine battuta.


Inclinare la testa in avanti sul lavandino in posizione più bassa rispetto alle spalle.

Portare l'erogatore al naso e premere delicatamente sulla narice.

Respirando attraverso la bocca durante tutto il trattamento, iniettare la soluzione finché non sia uscita dalla narice opposta.

Proseguire con l'altra narice.

È consigliabile soffiare il naso dopo il lavaggio nasale.

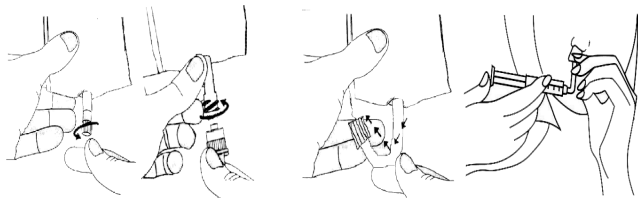

Se piccole quantità di soluzione dovessero defluire in gola causando tosse interrompere il trattamento ed espellere o deglutire.

La soluzione in piccole dosi non è tossica.

Se la tosse dovesse diventare fragorosa è consigliabile dare dei colpetti in prossimità della schiena (tra le due scapole).

Se il bambino lamenta sintomi quali fastidio alle orecchie o senso di occlusione, interrompere l'operazione.

Nei bambini, causa la difficoltà nel tenere la bocca aperta, si raccomanda di tenergli la testa in avanti e più in basso rispetto alle spalle.

Non utilizzare in caso di epistassi (sangue dal naso) in corso o appena conclusa.

Non usare in caso di ipersensibilità specifica a qualche componente della soluzione di lavaggio.

Non utilizzare dopo la data di scadenza della soluzione.

Non utilizzare se il dispositivo è danneggiato.

Il prodotto è per esclusivo uso esterno.

**La soluzione può essere utilizzata entro 48 ore dall'apertura, se correttamente conservata in luoghi asciutti al riparo della luce e lontano da fonti di calore.**

## LIMITAZIONI

La sterilità e le date di scadenza riportate sulla soluzione si riferiscono al prodotto integro e correttamente conservato.

Conservare al riparo di luce solare diretta e fonti di calore.

Il dispositivo è destinato ad un uso monopaziente.

Da sostituire periodicamente.

### MADE IN ITALY

Tutti i prodotti EP Medica sono realizzati o subiscono l'ultima lavorazione sostanziale in Italia.



Prodotto da E.P. Medica Srl

Via dell'artigianato 30

48034 Fusignano (RA)

C.F. e P.I. 02506400395

+39 0545 1893255 | info@epmedica.it

[www.epmedica.it](http://www.epmedica.it)